

KORREKTES ANLEGEN DER PARTIKELFILTRIERENDEN ATEMSCUTZMASKEN VON HALYARD

Um zu gewährleisten, dass Ihre partikelfiltrierende Atemschutzmaske den gewünschten Schutz bietet, ist es wichtig, sie korrekt anzulegen und **BEI JEDEM TRAGEN** ihren dichten Sitz zu überprüfen.

Anleitung zum korrekten Anlegen Ihrer partikelfiltrierenden Atemschutzmaske: Das Anlegen ist möglicherweise zunächst etwas ungewohnt, wird aber mit jeder Anwendung einfacher. Bitte bei Verwendung dieser Atemschutzmaske die Anweisungen rechts beachten.

Tipps zum Erzielen eines guten Sitzes:

Wenn bei der Dichtigkeitsprüfung Ihrer Atemschutzmaske Probleme auftauchen, versuchen Sie Folgendes:

1. Nehmen Sie die Anpassung der Atemschutzmaske vor dem Spiegel vor.
2. Bitten Sie jemanden zu prüfen, ob sich Haare oder Ohrringe verfangen haben und die Abdichtung behindern.
3. Versichern Sie sich, dass die Kopfbänder korrekt positioniert sind. Besonders wichtig ist der korrekte Sitz des oberen Kopfbandes im oberen Bereich Ihres Hinterkopfes, da dieses Band den unteren Teil der Maske fest am Kinn hält.

HINWEIS: Wenn Ihre Dichtigkeitsprüfung der Atemschutzmaske nach diesen Tipps noch immer nicht erfolgreich ist, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder Atemschutzbeauftragten.

FAHREN SIE MIT IHREN MASSNAHMEN ERST FORT, WENN IHRE DICHTIGKEITSPRÜFUNG IHRER ATEMSCUTZMASKE ERFOLGREICH WAR!!

Weitere Informationen erhalten Sie per E-Mail an: kundendienst@hyh.com oder über unsere Website: www.halyardhealth.de



KNOWLEDGE NETWORK* Klinische Fortbildung
Kompetenter Kundenservice
Fachkundige Verkaufsmitarbeiter
Hilfsmittel & optimale Verfahren
Klinische Forschung
Streben nach Perfektion



1 Ränder der Atemschutzmaske vollständig auseinanderziehen.



2 Nasenbügel leicht in Form biegen.



3 Atemschutzmaske mit der Öffnung nach unten halten, um die beiden Bänder freizugeben.



4 Mit den Zeigefingern und Daumen die beiden Bänder auseinanderziehen.



5 Bänder mit Daumen und Zeigefingern auseinanderhalten und Atemschutzmaske unterm Kinn ansetzen.



6 Bänder über den Kopf ziehen.



7 Daumen vom unteren Band loslassen und unten am Nacken positionieren.



8 Oberes Band am oberen Hinterkopf positionieren.



9 Nasenteil mit den Fingern fest über dem Nasenrücken andrücken.



10 Atemschutzmaske präzise justieren und die Ränder sicher anpassen, bis ein guter Sitz am Gesicht erreicht ist. Abschließend die Dichtigkeit prüfen.

ANLEITUNG FÜR DIE DICHTIGKEITSPRÜFUNG

ES IST WICHTIG, DASS DER ANWENDER BEI JEDEM ANLEGEN EINER ATEMSCUTZMASKE EINE DICHTIGKEITSPRÜFUNG VORNIMMT:

Mehrmals kräftig ein- und ausatmen. Die Atemschutzmaske sollte sich beim Einatmen leicht einziehen und beim Ausatmen wieder ausdehnen. Zwischen dem Gesicht und der Atemschutzmaske darf an keiner Stelle eine Luftundichtigkeit bestehen.

Wenn die Atemschutzmaske sich beim Atmen nicht einzieht und wieder ausdehnt ODER wenn irgendwo zwischen Gesicht und Maske eine Luftundichtigkeit besteht, sitzt die Maske NICHT richtig auf dem Gesicht. Der Sitz der Atemschutzmaske ist so lange zu korrigieren, bis keine Undichtigkeit mehr vorliegt und die Dichtigkeitsprüfung erfolgreich ist.